

**AMAÇ:**

..... Hastanesi Laboratuvar Biriminde hemogram cihazının doğru ve verimli şekilde kullanılması.

KAPSAM:

Hastane Laboratuvarı

SORUMLULAR:

Laboratuvar Sorumlu Doktoru ve Laboratuvar çalışanları(Teknikerler)

UYGULAMA:

1. Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
2. Öncelikle cihaz bakımı ve günlük yıkamaları yapılır. İç kontrolleri normal, yüksek, düşük seviyelerde çalışılır, değerlendirilir .Hasta numunesi olarak mor kapaklı EDTA' lı antikoagülanlı tüpe kan alınır. İç kontrol sonuçlarına göre numune çalışılmaya başlanır.
3. Ana menü sayfasından, fonksiyonlar, enformasyon, numuneyi ver, start ve çalışır.
4. Önce PROLİS ekranına yansıyan sonuçlar değerlendirilir. Daha sonra onaylanıp Probel HBYS ekranına aktarılır.

CİHAZ TEMİZLİĞİ:

Haftanın her günü sabahları clean solüsyonuyla temizliği yapılır. Cihazın dışı hergün dezenfektanlı solüsyon ile temizlenir, kurulanır.

İlgili Doküman:

Cihaz Kullanım Klavuzu