



AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM: Ameliyathane Birimi.

SORUMLULAR: İlgili Uzman Hekim. İlgili Sağlık Personeli

UYGULAMA:

- 1) Turnike cihazının fişini uygun topraklı prize takınız.
- 2) Hastanın ameliyat olacak koluna ya da bacağına pamuk sarılır.
- 3) Üzerine turnike cihazı yerleştirilir.
- 4) Cihazın sağ üst bölümünde yer alan **POWER** düğmesine basınız.
- 5) Kırmızı renkli ışık yanacaktır.
- 6) Hastanın kolu ya da bacağı 60 derece yükseltilir.
- 7) Cerrahın uygun gördüğü sayıya yükselene kadar **SİYAH** pressure (basınç) düğmesini sağa çevirerek şişiriniz.
- 8) İşlem bitince siyah pressure düğmesini sola doğru çevirerek ibreyi sıfırlayınız.

İlgili Dokümanlar:

- Cihaz Kullanım Kılavuzu