



### **Msü Ekibinden Kaynaklanan Nemli Bohça Nedenleri**

- Bohça ebatları normalden fazla
- Bohçalar sık yerleştirilmiş
- Metal malzeme yoğunluğu fazla
- Malzemeler nemli bohçalanmış
- Metal malzemeler oda sıcaklığında soğutulmuyor
- Cerrahi kapların kenar kıvrımlarında su birikiyor.

### **Msü Sterilizasyon Cihazından Kaynaklanan Nemli Bohça Nedenleri**

- Buhar kalitesi düşük
- Buhar miktarı yetersiz
- Drenaj vanası bozuk
- Filtre tıkalı
- Buhar ceketinde su var
- Kurutma süresi yetersiz
- Vakum kurutma sistemi arızalı
- Kazan sıcaklığı yetersiz ise bohçalar otoklavdan nemli çıkabilir.
- Nemli bohça takibi için kontrol kaydı yapılır.
- Nemli çıkan bohçalar kullanıma verilmez.