



**AMAÇ :** Kan bankasındaki derin dondurucunun doğru kullanım ve bakım şeklini belirler.

**KAPSAM:** Kan bankasındaki derin dondurucuları kapsar.

**SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından kan bankasında görevli laboratuvar teknisyenleri sorumludur.

**UYGULAMA:**

**A-KULLANIM:**

Derin dondurucu kapaklarını daima sıkıca kapalı tutunuz.

Isı göstergelerinin her zaman -20 C ila -40 C arasında olmasına dikkat ediniz.

Tam kan donasyonunu izleyen ilk 6 saat içinde komponentine ayrılmış olan plazmayı düzgünce yatay şekilde dolaba yerleştiriniz.

Plazmaları yerleştirirken gruplarına ve tarih sırasına dikkat ediniz. Ürün çıkışında eski tarihlilere öncelik veriniz.

**Buzdolabı ve Derin Dondurucu Isı Takip Formu** doldurularak ısı takipleri gerçekleştirilir.

Arıza ve güç kesintisinde derhal sorumlu hekime ve biyomedikal mühendisliğine haber veriniz.

**B-BAKIM:**

Yılda 4 kez dolap fişi çekilir, içi çamaşır suyu ile silinir, kurulanır ve yeniden çalıştırılır.

Derin dondurucunun bakımı ve ısı göstergelerinin doğruluğu biyomedikal mühendisliği tarafından yılda 1 kez, Hastane Tıbbi

**Cihazlar Yıllık Bakım Planı** 'nda belirtilen tarihte yapılır.

**İlgili Dokümanlar:**

- Buzdolabı ve Derin Dondurucu Isı Takip Formu
- Hastane Tıbbi Cihazlar Yıllık Bakım Planı