



AMAÇ: Kan çalkalama cihazında donör kanının alınması esnasında doğru ve uygun bir şekilde çalkalanmasını sağlamak

KAPSAM: K.T.M. Çalışanları

SORUMLULAR: K.T.M. Sorumlu Hekimi ve Çalışanları

UYGULAMA:

Start düğmesinden cihaz açılır . Kalibrasyon düğmesine basılarak cihazın kendini kalibre etmesi beklenir.

Kan torbası kefeye konur klemp altından geçirilir . KLEMP düğmesine basılır. KLEMP kan alma işlemini keser . Bu aşamada cihaz üzerindeki torbanın darasını otomatik olarak alır.

Donörün damarına iğne girilip START düğmesine basılır. KLEMP açılır ve cihaz otomatik olarak kanı almaya başlar. Kan alımında torbaya donörden kan gelmediği zaman cihaz alarm verir. Ekranın üst kısmında alarm yazısı çıkar. Kan akışı geldiğinde alarm durur. Cihaz ayarlanan volüme geldiğinde kan alma işlemini otomatik olarak durdurur. KLEMP kapanır. Kan alma işleminin bittiği alarmı gösterir. Işık yanıp söner. TIME düğmesine basılıp kan alma zamanı görülür. END düğmesine basılınca torbanın toplam ağırlığı görülür. KLEMP düğmesine basılarak torba çıkartılır. Yeni donör için işlem tekrar başlatılır.