



### **AMAÇ**

Bu talimatın hazırlanmasındaki amaç ..... Hastanesi 'ndeki Röntgen cihazının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

### **GÖREV VE SORUMLULUKLAR:**

Cihazın kullanımından Görüntüleme Hizmetleri ' nde çalışan Röntgen Teknisyeni / Teknikeri sorumludur.

### **TALİMATIN DETAYI**

Cihazın kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Klimaların açık olması gerekmektedir.
- Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- İnfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır .
- Sıcaklık değerlerinin firma spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol altına alınmalıdır .

### **KULLANIMI**

1. Cihaz kumanda panelinden 'On' konumuna getirilir.
2. Cihazda masa tüp ayarlaması yapılır.
3. İstem kağıdına uygun olarak hastaya pozisyon verilir.
4. Bilgisayar çalışma sayfasından hastanın adı girilir. Çekim yapılacak bölge seçilir. Dedektör seçimi yapılır.
5. Kumanda panelinden hastaya uygun doz verilir.
6. Ekpojer düğmesine basılır.
7. Filmler PAC sistemi ile probelden doktor çalışma sayfasına gönderilir.

### **BAKIM**

- Cihazın bakımı aylık, yetkili servis tarafından yapılır.
- Arıza halinde teknik servise haber verilir.

### **İlgili Dokümanlar:**

- Cihaz Kullanım Klavuzu