



1.AMAÇ:

Hastayı enfeksiyondan korumak, kullanıcının yasal güvenliğini sağlamak, malzemelerin temizliğini, kontrolünü, bakımını sağlamak, kayıp - kırık alet takibi yapmak ve çalışanların enfeksiyon riskini azaltmaktadır.

2.KAPSAM:

Bu talimat cerrahi aletlerin temizlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLULAR:

Merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışan tüm personel bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

4.UYGULAMA:

4.1.Kirli alanda temizliği yapılmış ve temiz alana bırakılmış konteynerların yeniden kutu ve kapak kontrolü yapılır.

4.2.Açılarak yıkanmış olan aletler kapalı konuma getirilir.

4.3.Aspiratör gibi lümenli aletlerin temizliği yeniden kontrol edilir. (Tıkalı olup olmadığı)

4.4.Aletlerin sert olan eklem yerleri püskürtme yağı ile yağlanır.

4.5.Gerektiğinde makaslar bilenir.

4.8.Aletler, listesine göre toplanır.

4.9.Son kontrolde eksik tespit edildiyse kullanıcı ile iletişim kurulur.

4.10.Tel sepetin altına wrep konur ve aletler tel sepete yerleştirilir.

4.11.Aletlerin konduğu tel sepet ait olduğu isim ve bölüm kontrol edilerek uygun konteynera konur.

4.12.Konteynır kutu ve kapak bağlantı yeri proses indikatörlü kilitleme etiketi ile kilitlenir.

4.13.Sterilizasyon işlemi için otoklav teknisyenine teslim edilir.

4.14.Tekstil mutlaka çift kat paketlenir ve proses indikatörlü bant ile kapatılır.

4.15.Üzerine paket içeriği yazılır.

4.16.Sterilizasyon işlemi için otoklav teknisyenine teslim edilir.