



**Amaç:** Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

**Kapsam:** Sterilizasyon Ünitesi

**Sorumlular:** Sterilizasyon Ünitesi Çalışanları

**Uygulama:**

1. Cihazın sağ tarafındaki yeşil düğmeye basılarak çalıştırılır.
2. 5 dakika bekledikten sonra ısı 153 C 'yi bulur. Makine bu durumda hazırdır.
3. Paketleme kağıdı makinenin ortasında bulunan oluktan geçirilir. Böylece kağıdın bir tarafı (açık kısmı) kapatılmış olur. İçine malzeme yerleştirilir diğer taraftan kapatılır.
4. Cihazın sağ tarafındaki yeşil düğmeye basılarak cihaz kapatılır.

**İlgili Dokümanlar:**

- Cihaz Kullanım Klavuzu