



**1) AMAÇ:** Bulaşıcı hastalıkların hastadan personele, personelden hastaya veya bir hastadan diğer bir hastaya bulaşma riskini azaltmak için gözlük/yüz koruyucu siperlik kullanma ve dezenfeksiyon yöntemlerini belirlemektir.

**2) KAPSAM:** Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarının uygun şekilde gözlük/yüz koruyucu siperlik kullanımı ve dezenfeksiyonu faaliyetlerini kapsar.

**3) SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından tanı, tedavi ve bakım uygulamalarında görev alan tüm hastane çalışanları sorumludur.

#### **4) FAALİYET AKIŞI**

##### **4.1. Gözlük/Yüz Koruyucu Siperlik Kullanılması Gereken Durumlar**

Tüm sıçrama ihtimalli cerrahi uygulamaların da , aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, kan sıçrama vs. olasılıklarda, endoskopik girişimlerde, diş cerrahisi girişimleri esnasında vücut sıvıları, salgılar, kan ve doku sıçrama olasılığında kullanılır.

##### **4.2. Gözlük/yüz Koruyucu Siperlik Nasıl Kullanılır?**

- Gözlük/yüz koruyucu siperlik bütünlüğü kontrol edilir.
- El hijyeni sağlanır.
- Kişisel koruyucu ekipman (KKE) sıra sıra uygun şekilde gözlük/yüz koruyucu siperlik sırası geldiğinde yüz ve gözler tam kapanacak şekilde takılır.
- İşlem bittikten sonra gözlük-yüz koruyucusunun dış yüzeyi kontamine kabul edilir.
- Gözlük-yüz koruyucu siperlik başın arkasındaki kafa bandı kaldırılarak ön tarafına dokunulmadan çıkartılır.
- Çıkarıldıktan sonra kontamine olan malzeme kirli kabına konur.
- Çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanır.
- Gözlük-yüz koruyucu tekrar kullanılabilir özelliğe sahipse temizlik işlemi için uygun yere bırakılır, değilse tıbbi atık kutusuna atılır.

**4.3. Gözlük/yüz Koruyucu Siperlik Temizlik/Dezenfeksiyonu Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler, su ile mekanik temizliği yapıldıktan sonra kurulanır. Daha sonra %70 etil alkol ile silinip dezenfekte edilerek kendi kendine kurumak üzere uygun temiz bir alana bırakılır. Kan, sekresyon, kusmuk vs. sıçramış ise mekanik temizliği yapıldıktan sonra 1/10 oranında karışım hazırlanarak içerisinde 10 dakika bekletilip, durulanıp, kurulanır. Dezenfekte edilen gözlükler tekrar kullanılmak üzere uygun alanda saklanır.**