



UYGULAMA	GÜNLÜK BAKIM ÇİZELGESİ																																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Cihaz ve Genel Çalışma Alanı Temizliği																																	
Kullanılmış Küvetlerin Atılması																																	

UYGULAMA	HAFTALIK BAKIM ÇİZELGESİ																																
	1							2							3							4											
Küvet İnkübasyon Yeri Temizliği																																	
Reaktif İnkübasyon Yeri Temizliği																																	

Temizlik ve Dezenfeksiyon

- Cihaz ve Çalışma Alanı herhangi bir bulaşmayı önlemek için düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
- Cihazın temizliği için nemli bir bez kullanın. Sprey veya doğrudan sıvı dökmek analizörün fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.
- Dezenfeksiyon için seyreltilmiş alkol kullanın.
- Cihazın iç aksam temizliği için, 8küvet ve reaktif inkübasyon yeri) alkole batırılmış gazlı bez kullanılır.