

**1.0 CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER**

- Yoğun Bakım Üniteleri

2.0 SORUMLULAR

- Sorumlu Hekim, Sorumlu Hemşire, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Hasta Bakım Personeli

3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLER

- Cihazın sürekli kullanıma hazır olması sağlanır.

4.0 KULLANIMI

- Hasta yatağının üzerine şişme özelliğine sahip planstik yatak serilir.
- Havalı yatak motorunun iki adet plastik hotumu plastik yatağı girişlerine bağlanır.
- Havalı yatak motoru prize takılır.
- Motor üstündeki açma kapama düğmesine basılarak motoru çalıştırılır.
- Havalı yatak motorunun plastik yatağı şişirip şişirmediğini kontrol eder.
- İşlem bittikten sonra fişi çekilir ve uygun bir şekilde temizlenir

5.0 BAKIMI

- Hasta taburcu olduğunda havalı yatak temizlenerek yeni hasta için hazırlanır.
- Arıza durumunda Arıza Talep Formu ile Teknik Servise bildirilir. Sorunu giderir veya yetkili firma çağrılarak sorun giderilir.