



AMAÇ: Hastanesi kan transfüzyonunda kart yöntemi ile VDRL testi çalışmak

KAPSAM : Laboratuvar Hizmetleri

SORUMLULAR: Laboratuvar Sorumlu Doktoru, Laboratuvar Teknisyenleri

UYGULAMA:

- Test kitini poşetinden çıkarın. Testin ve serum /plazma örneklerin oda sıcaklığına getirin.
- Damlalığa serum/plazma örneği çekin ve kasetin örnek gözüne 3 damla damlatın
- Örnek içerisindeki HbsAb yoğunluğuna bağlı olarak sonuçlar 5 dk dahi okunabilir.

VDRL(SİFİLİZ) KART TEST

Çalışma Yöntemi: Kart test

Çalışma Zamanı: Mesai saatlerinde

Örnek Alma Zamanı: Gün içerisinde

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün

Örnek türü / Örnek Kabı: Serum / Kırmızı Kapaklı Tüp

Normal Değer Aralığı: Negatif veya tek çizgi

Klinik Yararı Sifilizde pozitif

ÖRNEK RED KRİTERİ: Hemoliz, lipemi

PANİK DEĞER: Pozitif değer

İlgili Dokümanlar:

- Laboratuvar Test Rehberi