



AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM: Kadın Doğum veya Çocuk servisleri

SORUMLULAR: İlgili Uzman Hekim, Çocuk veya Kadın doğum Servisi Ebe, Hemşireleri

FANEM MARKA FOTOTERAPİ CİHAZI

1. Fototerapi cihazının fişi prize takılır.
2. Cihaz ON düğmesine basılarak açılır, lambaları kontrol edilir.
3. Cihazın kolundan yüksekliği alçaklığı bebek yatağına göre ayarlanır.
4. Cihaz sabit olarak 59 °ye ayarlıdır. Isı çok yükseldiğinde kendiliğinden kapanır.
5. Bu durumda ON düğmesine basılarak tekrar açılır.
6. Işın alma saati sonunda cihaz OFF tuşuna basılarak kapatılır.
7. Fototerapinin fişi prizden çıkarılır. Cihaz yerine kaldırılır.
8. Fototerapi alacak bebeğin genel bakımı (ağız, göz, göbek) yapılır. ANS alınır, emmesi değerlendirilir. Bebek kuvöze bebek bezi bağlanarak çıplak olarak yerleştirilir. Bebeğin gözüne fototerapi gözlüğü takılır. Hekim gözlemi ile Kan İstem Sonuçları doğrultusunda bebeğin tedavisine yön verilir.
9. Çocuğun pozisyonu 2 saat aralıklarla değiştirilir.
10. İşlem bittikten sonra çocuk kuvözden çıkarılır.

TENDE MARKA FOTOTERAPİ CİHAZI

1. Fototerapi cihazının fişi prize takılır.
2. Cihaz ON düğmesine basılarak açılır.
3. Cihazın kolundan yüksekliği alçaklığı bebek yatağına göre ayarlanır.
4. LCD ekranda standart mod ve zaman ayarlı mod seçenekleri çıkar.
5. Standart mod seçilerek enter tuşuna basılır.
6. Ekrandaki menü tuşuyla saat ayarları yapılır.
7. Mak tuşuyla ışın derecesi arttırılabilir.
8. Yön tuşlarıyla menüler arası geçiş yapılabilir.
9. Işın alma saati sonunda cihaz OFF tuşuna basılarak kapatılır.