



1.AMAÇ:Cihazın doğru olarak, amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2.TANIMLAR:Sevk olan bebeklerde kullanılır.(Acil ağır vakalarda)

3.CİHAZ KULLANIMI:

- a. Cihaz fişe takılır.Sürekli olarak şarjının dolu olması gerekir.
- b. Bebek yatırılmadan önce kuvöz açma-kapama düğmesine basılır ve gerekli ısıya getirilir.İsı;36-37 derece olmalıdır.
- c. Bebek kuvözün içine konur.
- d. Orderdaki O2 miktarı ayarlanır.(makinenin üzerindeki düğmelerden)
- e. Monitörden ısı ve oksijen düzey göstergeleri kontrol edilir.
- f. Hasta kuvözün içinde ambulansa verilir.
- g. Geri getirilen transport kuvöz teslim alındıktan sonra şarja konur.
- h. Kuvöz temizlenip yeni bir vakaya her an için hazır olacak duruma getirilir.

İlgili Dokümanlar:

Cihaz Kullanım Klavuzu