



**AMAÇ:** Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

**KAPSAM:** Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi.

**SORUMLULAR:** Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

**UYGULAMA:**

1. Cihazın fişi uygun şebeke voltajına (220 V topraklı prize) takılır.
2. Cihazı açmak için Power düğmesine basılır.
3. Ekran 3.5 MHz probla açılıncaya kadar beklenir.
4. Hastanın bilgileri ID butonuna tıklanarak girilir.
5. Hasta muayene masasına uygun pozisyonda yatırılır ve ultrasonik jel yardımı ile uygulamaya başlanır.
6. Ölçümler ve diğer işlemler için cihazın uygun butonlarından yararlanılır.
7. İşlem bitince freze butonuna tıklanarak cihaz kapatılır.
8. Cihazın günlük bakımı sorumlusu tarafından cihaz kapalı iken nemli bir bezle tozu alınarak ve gün bitiminde yine cihaz kapalı iken temizlik spreyi ile problemlerin temizlenmesiyle yapılır.
9. Cihazı sorumlusundan başkası kullanamaz.
10. Cihazla ilgili bir arıza olduğunda yetkili teknik servise haber verilir.

**İlgili Dokümanlar:**

Cihaz Kullanım Klavuzu