



AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM: Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi.

SORUMLULAR:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Çalışan Sağlık Çalışanları.

UYGULAMA:

1. Açma- kapama düğmesini açık konumuna getirin.
2. Tartılacak bebek cihazın üstüne yatırılır.
3. Kilosu okunur.
4. Bebek tartının üzerinden alınır.
5. Tartının düğmesini kapatılır.