



**AMAÇ:** ..... Hastanesi laboratuvar bölümünde yer alan M.4818.P Digital elektro-mag santrifüj cihazının kullanımı.

**KAPSAM :** Hastanemizdeki Laboratuvarlar

**SORUMLULAR:** Laboratuvar Sorumlu Hekimi, Laboratuvar Teknisyeni

**UYGULAMA:**

1. Cihaz fişini 220 V topraklı prize takınız.
2. Cihazı arkasındaki düğmeden açınız.
3. Kapağı açınız.
4. Tüpleri dengeli olarak godelere yerleştiriniz.
5. Kapağı kapatınız.
6. Stand-by düğmesine basınız.
7. Start düğmesine basınız.
8. Cihaz devir sayısı ve süresini otomatik olarak ayarladığı için zamanı gelince otomatik olarak durur. **LİD** düğmesine basarak kapağı açınız.
9. Tüpleri alınız.

**CİHAZIN TEMİZLİĞİ :** Cihazın iç temizliği haftada bir dezenfektanlı solüsyonla silinir. Dış yüzü her gün sabah akşam dezenfektanlı bezle silinip kurulanır.

**İlgili Doküman:**

Cihaz Kullanım Klavuzu