



AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak

KAPSAM: Hastanesindeki nebulizatör cihazlarını kapsar.

SORUMLULAR:

- Doktor
- Hemşire/Ebe
- Sağlık Memuru

UYGULAMA:

1. Cihaz hasta başına getirilir ve fişe takılır.
2. Nebülizatör ile uyumlu set hazırlanır ve doktor orderındaki ilaç hazneye yerleştirilir.
3. Setin boşluktaki ucu nebulizatör üzerindeki giriş bölümüne takılır.
4. Setin maskeli ucu hastanın yüzüne yerleştirilir.
5. Cihazın on-off düğmesine basılır. Cihaz çalıştırılır.
6. İşlem sonunda on-off düğmesi ile cihaz durdurulur.
7. Set cihazdan çıkarılır.
8. Cihaz fişten çıkarılır.
9. Temizliği yapılır.