



**AMAÇ:**

..... Hastanesi Laboratuvar Ünitesinde kardiyak cihazının doğru ve verimli kullanımı.

**KAPSAM:**

Laboratuvar çalışanları

**SORUMLULAR:**

Laboratuvar Sorumlu Hekimi ve Laboratuvar Çalışanları

**UYGULAMA:**

Öncelikle kalibrasyon ve kontrol çalışılır.Cihaz istediğinde cleaning verilir.

Kontroller çalışıldıktan sonra, kit yükleme için analyzer status bölümünden consumable - insert replace- certuj ve kit yükleme yapılır., kapağı açılır barkod aşağı gelecek şekilde yüklenir accept tuşuna basılır. Cihaz istediğinde yıkama cleaning verilir. Troponin I 20 dk, BHCG 20 dk ' da CKMB 20 dk da sonuç çıkar ve onaylanır.

**Test Çalışma:**

Sample Manager ► Barkodu okut, tüpü yerleştir bölmeye, Run tuşuna bas.

**Kalibrasyon:**

- Anasayfa ► Calibration ► Calibrator setup ► Add Calibrator ► Barkodları sırayla okut.
- Anasayfa ► Sample Manager ► Rack ın barkod okut ► Test Request ► Request Calibration ► Kalibratörü seç ► Load Rock ► Run

**İlgili Dokümanlar:**

- Cihaz Kullanım Klavuzu