



Amaç: Sağlık Tesislerimizde Tıbbi cihazların doğru ve etkin kullanımının sağlanması için çalışanların bilgilendirilerek cihaz arızalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam: Defibrilatör ve Ekg Cihaz Kullanıcıları

Sorumlular: Bu talimatın uygulama ve kontrolünden Hastane Yönetimi, Klinik Mühendislik Birimi, Birim Sorumluları ve Cihazları kullanan tüm personel sorumludur.

UYGULAMA

1. Defibrilatör ve EKG cihazlarının günlük bakımı mutlaka yapılmalıdır.
2. Defibrilatör ve EKG cihazlarının genel temizliği her kullanımdan sonra yapılmalı, şok kaşıklarında ve hasta leadlerinde jel artığı temizliği mutlaka sağlanmalıdır.
3. Kaşıkların temizliğinde kaşıkların yüzeyini çizecek herhangi bir sert cisim (bulaşık teli, tel, fırça vb.) **kesinlikle kullanılmamalıdır.**
4. Kaşıklarda oksitlenme görüldüğünde oksit sökücü kimyasal madde ile oksitlerden mutlaka arındırılmalıdır.
5. Cihazın genel temizliği dezenfektan ile yapılmalıdır.
6. Cihazların enerji testi günlük olarak yapılmalı ve genel çalışma performansı kontrol edilmelidir.
7. Cihazlarda herhangi bir arıza tespit edilmesi durumunda arıza işlemi başlatılarak Klinik Mühendislik Birimi'ne haber verilmelidir.