



AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM: Hastanesindeki aspiratör cihazlarını ve kullanıcılarını kapsar.

SORUMLULAR:

- Doktor
- Ebe/ hemşire
- Sağlık Memuru

UYGULAMA

1. Bu cihaz vücut boşluklarındaki sıvıların devamlı veya kısa süreli drenajında kullanılır. Cihazın güç kablosunu prize takınız prizin topraklı olmasına dikkat ediniz.
2. Cihaz üzerinde bulunan ON/OFF anahtarını ON konumuna getiriniz cihazın çalıştığını ikaz lambasından izleyebilirsiniz.
3. Cihazı çalıştırmaya başlamadan sekresyon şişelerinin kapaklarının tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz. Kapaklar tam oturmamış ise vakum kaçağı olacağından cihazdan gerekli verim alınamaz.
4. Sınırlamak istediğiniz vakum derecesini vakum ayar musluğundan yararlanarak sınırlayınız.
5. Vakum ayar musluğu ilk çalışmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer açık ise maksimum verim alınamaz
6. Toplama kavonozları üzerinde bulunan hortum vasıtasıyla hastanın vakum yapılacak bölgesine bağlantı yapılarak veya tutularak gerekli olan vakum işlemi gerçekleştirilir.
7. Cihazla işiniz bittiğinde ON/OFF anahtarını kapatınız.
8. Toplama şişelerini enfeksiyon yaratabilecek içeriğinin boşaltılması özenle ve daima klinik alanın dışında yapılmalıdır. Temiz ve usulünce steril edilmiş şişe kullanınız acil kullanım için yeterli temiz ve sterilize edilmiş şişe bulundurmaya özen gösteriniz.
9. Cihaz hafif nemli bir bez ile düzenli olarak silinmelidir. İnatçı kirler için (kan v.s.) küçük bir miktar normal sabun kullanılabilir. Cihaz kullanılmadan önce iyice kurulanmalıdır. Toplama şişeleri her servisten sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
10. Su buharı ile sterilizasyon: 30 dk süre ile bir atmosfer basınçla 121 C su buharı
11. Etilen oksit gazı ile sterilizasyon
12. Gözenekler dolduğunda bakteri filtreleri tekrar kullanılamaz .Yakarak imha edilmelidir.
13. Fişi ıslak elle tutmayınız, aletli suya batırmayınız. Böyle bir şey olursa hemen fişi çekiniz. Suya düşmüş bir aleti fişini çekmeden ellemez.
14. Cihazı kullandıktan sonra mutlaka fişini çekiniz.
15. Kimyasal dezenfektanları kullanırken mutlaka üretici firmalarının talimatlarına uyunuz.