



AMAÇ: Hastanesi kan transfüzyonunda kart yöntemi ile anti-HBS testi çalışmak

KAPSAM: Laboratuvar

SORUMLULAR: Laboratuvar Sorumlu Doktoru, Laboratuvar Teknisyeni

UYGULAMA:

1. Test kitini poşetinden çıkarın. Testin ve serum /plazma örneklerin oda sıcaklığına getirin.
2. Damlalığa serum/plazma örneği çekin ve kasetin örnek gözüne 3 damla damlatın
3. Örnek içerisindeki HbsAb yoğunluğuna bağlı olarak sonuçlar 5 dk dahi okunabilir.

ANTİ HBS

Çalışma Yöntemi: KART TEST

Çalışma Zamanı: Her gün

Örnek Alma Zamanı: Mesai saatleri içinde

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün içinde

Örnek türü / Örnek Kabı: Serum / Kırmızı Kapaklı Tüp

Normal Değer Aralığı: Negatif veya tek çizgi

Klinik Yararı: HBV 'ye bağlı hepatit geçirmiş ve antikor oluşturmuş kişilerde, HBV aşısı olanlarda antikor pozitif çıkar.

ÖRNEK RED KRİTERİ: Hemoliz, lipemi, ikter

PANİK DEĞER: Yok

İlgili Dokümanlar:

- Laboratuvar Test Rehberi