



AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM: Hastanesindeki tansiyon alet cihazlarını kapsar.

SORUMLULAR:

- Doktor
- Hemşire/Ebe
- Sağlık Memuru

UYGULAMA:

1. Tansiyon aletinin kol manşonu içindeki hava boşaltılır
2. Manşon dirsekten 2 cm yukarı ve basınç kabloları önkol üstünde kalacak şekilde bağlanır
3. Steteskop kol manşonu ile kol arasına arter üstüne gelecek şekilde yerleştirilir
4. Mümkünse kol kalp seviyesinde tutturulur
5. Hava tahliye düğmesi saat yönünde çevrilerek kapatılır
6. Hastanın genel durumuna uygun olacak şekilde manometreden basıncı görerek uygun yere kadar şişirilir
7. Hava tahliye düğmesi saat yönünün tersine çevrilerek hava yavaş yavaş boşaltılır
8. Steteskoptan ilk ve son duyulan atım sesi manometreden gözlenir
9. Tansiyon ölçüm işlemi yapıldıktan sonra kol manşonundaki hava tamamen boşaltılır, manşon hastanın kolundan alınır
10. Manşon ve hava hortumu dairesel bir şekilde sarılır, kullanıma hazır halde bırakılır.