



**1. AMAÇ:** Cerrahi operasyon sırasında hastalara gerekli pozisyonun verilmesini sağlamak.

**2. SORUMLU:** Hekim, hemşire, sağlık memuru, anestezi teknisyeni ve yardımcı sağlık personeli.

**3. UYGULAMA:**

1. Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir,
2. Gerekli pozisyonların verilmesini sağlayan kolları, butonları ve kumandası kontrol edilir,
3. Ameliyat masasının yüksekliği ayarlanır,
4. Hasta masaya alınır,
5. Cerrahi operasyonu gerçekleştirecek operatörün istediği pozisyonlar kollar ve kumanda sayesinde verilir,
6. Operasyon btiminde dış yüzey temizliği yapılır,
7. Arıza durumunda arıza bildirimini yapılır, gerekirse atölyeye ve teknik servise haber verilir.

**4. BAKIM:**

1. Günlük çalışma sonunda nemli bezel temizliği yapılır,
2. Arıza durumunda arıza HBYS arıza bildirimini ile atölyeye bilgi verilir.

**Referans Dokümanlar:**

Kullanım Kılavuzu