



**ÜRÜN İÇERİĞİ:** Fosforik Asit, Sitrik Asit Monohidrat, Nitrik Asit, Kom Pleks Yapıcı, DMDMH, Korozyon İnhibitörü, Deiyonize Su, Parfüm

**KULLANIM ALANLARI:** Dental alan kullanılan cerrahi aletlerin üzerine yapışan kan, tükürük, doku parçalarının yanı sıra ölçü kaşıkları üzerinde kalan aljinat kalıntıları, spatüllerde biriken simanlar dahil tüm kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Clover Dent kullanıma hazır bir üründür. Sulandırma işlemi yapılmadan direkt olarak kullanılır. Clover Dent hem ultrasonik yıkama makinalarında hem de manuel kullanıma uygun bir üründür. Temizleme işleminden sonra mutlaka durulama işlemi yapılmalıdır. Ürün sulandırıldığında Ph 3 olmalıdır.

Clover Dent ultrasonik yıkama makinalarında malzemelerin kirlilik derecelerine bağlı olarak 15-25 dakika arasında aletlerin temizleme işlemini gerçekleştirir. Ürün malzemenin yoğunluğuna ve kirlilik derecesine bağlı olarak sıvı renkten scalada gösterilen yeşil renge döndüğünde etkinliğini kaybeder.