



AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

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
KAPSAM: Hastanemizde bulunan tüm klinikler

SORUMLULAR: Tüm sağlık çalışanları

UYGULAMA:

1. Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
2. EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.
3. Hasta sırt üstü yatırılır üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır (küpe, yüzük, saat vb).
4. Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.

Elektrotlar aşağıdaki şekilde bağlanır:



1. Record düğmesine basılarak çekim yapılır. Çıktı alındıktan sonra hastadan elektrodlar sökülür. Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.
2. EKG kabloları dairesel olarak toplanır.
3. EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.

NIHON KOHDEN MARKA ECG 9620 L MODEL

1. Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
2. Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.
3. Elektrodlar yukarıdaki şekildeki gibi bağlanır.
4. Enter tuşuna basılarak kayda başlanır.
5. Cihazdan analiz raporu alınır ve işlem tamamlanır.
6. 6 Nolu tuş ile hastanın yaş aralığı belirlenir.
7. 7 Nolu tuş ile hastanın cinsiyeti belirlenir.
8. Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.

NIHON KOHDEN MARKA ECG 1350 K MODEL

1. Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
2. Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.
3. Elektrotlar yukarıdaki şekildeki gibi bağlanır.
4. Yeşil büyük Enter tuşuna basılarak kayda başlanır.
5. Cihazdan analiz raporu alınır çıktı verildikten sonra elektrodlar sökülüp açma/kapama anahtarından kapatılır.