



AMAÇ: Devlet Hastanesi kan transfüzyonunda kart yöntemi ile HCV testi çalışmak

KAPSAM : Laboratuvar Hizmetleri

SORUMLULAR: Laboratuvar Sorumlu Doktoru, Laboratuvar Teknisyenleri

UYGULAMA:

1. Test kitini poşetinden çıkarın. Testin ve serum /plazma örneklerin oda sıcaklığına getirin.
2. Damlalığa serum/plazma örneği çekin ve kasetin örnek gözüne 3 damla damlatın
3. Örnek içerisindeki HbsAb yoğunluğuna bağlı olarak sonuçlar 5 dk dahi okunabilir.

HCV KART TEST

Çalışma Yöntemi: Kart test

Çalışma Zamanı: Mesai saatlerinde

Örnek Alma Zamanı: Gün içerisinde

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün

Örnek türü / Örnek Kabı: Serum / Kırmızı Kapaklı Tüp

Normal Değer Aralığı: Negatif veya tek çizgi

Klinik Yararı: HCV enfeksiyonu, taşıyıcılık durumlarında antikor titresi yüksektir (pozitif).

İlgili Dokümanlar:

- Laboratuvar Test Rehberi