



| UYGULAMA                               | GÜNLÜK BAKIM ÇİZELGESİ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|--|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|  | 01                     | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| Cihaz ve Genel Çalışma Alanı Temizliği |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Kullanılmış Küvetlerin Atılması        |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

| UYGULAMA                          | HAFTALIK BAKIM ÇİZELGESİ |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   | 1                        |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Küvet İnkübasyon Yeri Temizliği   |                          |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reaktif İnkübasyon Yeri Temizliği |                          |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Temizlik ve Dezenfeksiyon

- Cihaz ve Çalışma Alanı herhangi bir bulaşmayı önlemek için düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
- Cihazın temizliği için nemli bir bez kullanın. Sprey veya doğrudan sıvı dökmek analizörün fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.
- Dezenfeksiyon için seyreltilmiş alkol kullanın.
- Cihazın iç aksam temizliği için, 8küvet ve reaktif inkübasyon yeri) alkole batırılmış gazlı bez kullanılır.