

**1.0 CİHAZIN KULLANILDIĐI YERLER;**

- YoĐun Bakım Üniteleri

2.0 SORUMLULAR

- Sorumlu hekim, Sorumlu Hemşire, hemşire, ebe, saĐlık memuru

3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihazın sürekli çalışması saĐlanır
- Elektrik kesintilerine karşı cihaz güç kaynaĐı(batarya) ile beslenir.

4.0 KULLANIMI

- Monitör kablolarına kalp elektrotları takılır.
- Kırmızı renkli kablo saĐa, sarı renkli kablo sola, yeşil renkli kablo sola kaburgalar altındaki bölgeye ayrı ayrı yapıştırılır.
- Monitör on-of düĐmesine basılarak açık konumuna getirilir.
- ECG düĐmesine bakılarak istenilen derivasyon ayarı yapılır.
- NIBP düĐmesine basılarak, (cihaz ile bağlantılı bulunan tansiyon aletinin manşeti hastanın koluna yerleştirildikten sonra) otomatik olarak hastanın tansiyonu ölçülür. İstenirse 2 dakikadan başlayıp 8 saate kadar otomatik olarak ayarlanıp tansiyon ölçülür. REC düĐmesi ile ölçülen tansiyonların kayıtları çıkartılır. Sa O2 parmak probu hastanın parmaĐına takılır O2 parametresi ve solunum sayısı izlenir.
- Hasta taburcu olunca başka hasta için temizliĐi yapılır.

5.0 BAKIMI

- Arıza durumunda Arıza Talep Formu ile Teknik Servise bildirilir.
- Yılda 1 kez kalibrasyon ve Teknik Servis tarafından bakımı yapılır.