



Doküman Kodu: DH.FR.001

Yayın Tarihi: 15.09.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 1

YIL / AY:...../.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	KONTROL			
KÜVÖZLERİN İÇİ VE DIŞI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENDİ																																			
KÜVÖZ KAPAKÇIKLARI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ TEMİZLENMİŞ																																			
KÜVÖZ KAPAKÇIKLARININ KOLLARI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ TEMİZLENMİŞ																																			
(HASTA VAR İSE) KÜVÖZ SU HAZNESİNİN NEMLENDİRME KAPLARI BOŞALTILMIŞ. TEMİZLENMİŞ VE KURULANMIŞ. STERİL SU KONMUŞ																																			
KÜVÖZÜN DIŞI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ SİLİNMİŞ																																			
KÜVÖZÜN AYRILABİLİR PARÇALARI ÇIKARILMIŞ FIRÇALANARAK DETERJANLA YIKANMIŞ. SONRA DURULANMIŞ																																			
KÜVÖZÜN AYRILABİLİR PARÇALARI TEK KULLANIMLIK KAĞIT HAVLU İLE KURULANMIŞ																																			
KÜVÖZÜN AYRILABİLİR PARÇALARI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ İLE DEZENFEKTE EDİLMİŞ																																			
KÜVÖZ SU HAZNESİNİN NEMLENDİRME KAPLARI BOŞALTILMIŞ, TEMİZLENMİŞ VE KURULANMIŞ																																			

1-Kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.

2-Küvözlerin içi ve dışı her gün temizlenir.

3-Uzun süre izlenen bebeğin küvözü en az haftada (1 kg altında 5 günde) bir dezenfekte edilmeli, bu işlem sırasında bebek, dezenfekte bir başka küvöze transfer edilmelidir.