



Doküman Kodu: BL.FR.006

Yayın Tarihi: 15.09.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 1

**Laboratuvarın Adı:****Tarih:****Cihaz:****Kontrolün Adı:****Kontrolün Lot Numarası:****Uyumsuz Testin Adı:****Red Sebebi:**

	Evet	Hayır	Belli Değil
<b>KONTROL SERUMUNA AİT DEĞERLENDİRMELER</b>			
Kontrolün miadı uygun mu?			
Lot değişikliği var mı?			
Sulandırma zamanı belli mi?			
Sulandırma uygun mu?			
Saklama koşulları uygun mu?			
Aynı kontrol serumu içinde ölçülen başka testlerde de bozulma var mı?			
Kontrol serumu homojen karışmış mı?			
Diğer?			
<b>REAKTİFE AİT DEĞERLENDİRMELER</b>			
Reaktifin miadı uygun mu?			
Reaktifin cihaz üzerindeki kalış süresi uygun mu?			
Reaktifin içinde kalan miktar?			
Diğer?			
<b>KALİBRATÖRE ve KALİBRASYONA AİT DEĞERLENDİRMELER</b>			
Son kullanılan kalibratörün miyadı uygun mu?			
Son kalibrasyonun performansı iyi mi?			
Kalibratör lot değişikliği var mı?			
Diğer?			
<b>SARFLARA AİT DEĞERLENDİRMELER</b>			
Sarf ve solüsyonların miadı uygun mu?			
Sarf ve solüsyonların miktarı yeterli mi?			
Sarf/solüsyonların cihaz üzerindeki kalış süresi uygun mu?			
Saf su kalitesi uygun mu?			
Diğer?			
<b>CİHAZA AİT DEĞERLENDİRMELER</b>			
Günlük bakımı yapılmış mı?			
Küvet temizliği uygun mu?			
Prob tıkanıklığı var mı?			
Pipetleme hatası var mı?			
Alarm var mı?			
Diğer?			

**Karar:****Düzeltilici Faliyet:****Düzeltilici Faliyeti Yapan Kişi:****Düzeltilici Faliyet Sonrası Sonuç:****Yorum:****Faliyeti Onaylayan Doktor:**