



1.0 AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.0 KAPSAM: Ameliyathane Birimi.

3.0 SORUMLULAR:

- İlgili Uzman Hekim.
- İlgili Sağlık Personeli.

4.0 UYGULAMA:

1. Cihazın fişi uygun şebeke voltajına (220 V topraklı) takılır.
2. Cihaza uygun pozisyon veriniz.
3. Ekran üzerinde "power" düğmesine basınız.
4. Kamera ışık kaynağının "start" düğmesine basınız. Sonra gaz cihazının sol altta yeşil "start" düğmesine basınız.
5. Koter cihazının sol altta yeşil "start" düğmesine basınız.
6. Hastanın kol ya da ayağına temas edecek şekilde koter plağını yerleştiriniz.
7. Aspiratör hortumlarının birini aspiratöre birine ise 1000cc şişe izotonik serumuna takınız ve "start" düğmesine basınız.
8. Kamera ışık kaynağına kamerayı yerleştiriniz. Cihaz ameliyata hazırdır.
9. Ameliyatta kullanılacak disposble malzemeler cerrahın isteğine göre açınız.
10. Cihazla ilgili bir arıza olduğunda yetkili teknik servise HBYS arıza bildirimini açılır.

Referans Dokümanlar

Cihaz Kullanım Kılavuzu