

**1.AMAÇ**

Kan transfüzyon merkezine gelen test numunelerinin uygun olup olmadığını belirlemek

**2.KAPSAM**

Yatan hastaya bakım yapan birimler, Acil servis

**3.SORUMLULAR**

İlgili Sağlık Personeli, Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu

**4.UYGULAMA****4.1 Kabul Kriterleri**

- Pıhtılı olmayan, barkodlu, hemolizis, uygun miktarda ve doğru tüpe alınmış kan numuneleri kabul edilir.
- Formlar eksiksiz doldurulmuş ise kabul edilir.
- Kızılay' dan gelen kan ürünleri uygun ortamda ve uygun koşullarda gelmiş ise kabul edilir.
- Gelen kan ürünlerinin üzerindeki etikette yapılmış tüm testlerin sonuçları, kan grubu ve örnek numarası kontrol edilir.
- Periferik venden aç ya da tok alınan en az 2,5 ml tam kan hemogram tüpüne konur, 1 - 2 defa alt üst edilip gönderilir. Hastaya ait bilgiler istek formu eksiksiz yazılarak numuneyle laboratuvara gönderilir.

**4.2. Red Kriterleri**

- Hemogram tüpüne alınan kan pıhtılı ise red edilir.
- Kan miktarı az ise numune red edilir.
- Hemolizli gelen kan numuneleri red edilir.
- Yanlış tüpte gelen numune red edilir.
- Üzerinde barkod bulunmayan numune red edilir.
- Kızılay' dan ambalajı delik olan kan ve kan ürünleri red edilir.
- Kızılay' dan gelen kan ve kan ürünlerinin mikrobiyoloji testleri çalışıldığını gösteren son kullanım tarihi gösteren barkod yoksa red edilir.
- Pıhtılı olan eritrosit süspansiyon red edilir.
- Soğuk zincire uygun taşınılmayan, saklanmayan kan ve kan ürünleri red edilir.