



AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM: Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi.

SORUMLULAR: Ebeler ve Hemşireler.

UYGULAMA:

- Cihazın fişi uygun şebeke voltajına (220 V topraklı) takılır
- Anne adayı yatağa sol yana yatırılır.
- Tocograph transducer, rahim yüksekliği tespit edilip rahim üst duvarına gelecek şekilde konur.US transducer'a jel

sürülür. US transducer de bebeğin kalp atışlarının en iyi alındığı yere konur.

- Cihazı açmak için açma kapama düğmesine basılır.
- Cihaz açılınca US transducer ve Tocograph transducer bağlanıp sabitlenir.
- Anne adayının eline bebek hareket ve kasılmalarını hissettiğinde basacağı kablolu buton verilir.
- ÇKS ve kontraksiyonlar ekranda sıfırlanır. Yazdıra tuşuna basılır.
- İşlem bittiğinde cihazı kapamak için açma kapama düğmesine basılır.
- Cihazın kağıdı bittiğinde 'no paper' yanıp sönmeye başlar. Kağıt haznesine NST kağıdı konulup kapağı kapatılır.
- Cihazın günlük bakımı sorumluları tarafından cihaz kapalı iken nemli bir bezle tozu alınarak yapılır.
- Cihazı sorumlularından başkası kullanamaz.
- Cihazla ilgili bir arıza olduğunda yetkili teknik servise haber verilir.

İlgili Dokümanlar:

- Cihaz Kullanım Klavuzu