



**AMAÇ:** Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

**KAPSAM:** Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi.

**SORUMLULAR:**

- İlgili Uzman Hekim.
- İlgili Sağlık Personeli.

**UYGULAMA:**

- Cihazın fişi uygun şebeke voltajına (220 V topraklı) takılır.
- Cihazın açma düğmesine basınız.
- O2 flowmetrisinden O2 ayarı yapınız.
- Sistemin derecesini sorumlu doktorun isteği doğrultusunda ayarlayınız.
- İşlem bittiğinde O2 kapatıp, cihaz kapatma düğmesine basınız

**İlgili Dokümanlar:**

- Cihaz Kullanım Klavuzu