



- 1. AMAÇ:** Otoklavın verimli ve güvenilir sterilizasyon sağlanması için bakımına ilişkin yapılacakları standardize etmek.
- 2. SORUMLULAR:** Merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanları.
- 3. UYGULAMA:**
  1. Her gün sonunda ön üst panodaki açma kapama (ON-OFF) düğmesi kapatılır.
  2. Sterilizatörün arka kısmındaki su giriş vanası kapatılır.
  3. Ana elektrik panosundaki şalter kapatılır.
  4. Kapak contalarının uzun ömürlü kullanımı için kapı hafifçe aralık bırakılır. Sterilizasyon bölmesinin günlük bakımında aşağıdaki işlemler yapılır:
    - a. Bölme her günün sonunda plastik bir fırça ile temizlenir.
    - b. İşlemler sırasında aşırı kirlenme olmuşsa derhal fırçalanır, temizlenir.
    - c. İç bölmelerin temizliği yapılırken çizilmemelidir.
    - d. Sterilizasyon bölmesi drenajındaki kireçlerin aylık bakımı için şu işlemler yapılmalıdır.
    - e. Sterilizatör içindeki süzgeci çıkarılır.
    - f. Arıtılmış su ile süzgeci iyice fırçalanır.
    - g. Süzgeç bol su ile yıkanır, kontrol edildikten sonra yerine yerleştirilir.
    - h. Aylık bakım ve validasyon yapılır.
    - a. Vakumpompaları, çekvalfler, kapıcontaları, kontaktörler, tümsolonoidler, manometreler, buhar jeneratörünün kontrolleri yapılır ve durumlarına göre gereken işlemler yapılır.