



AMAÇ: Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde kuvözden kaynaklanan hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması için kuvözlerin temizlik ve dezenfeksiyon yöntemini belirlemek.

KAPSAM: Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi.

SORUMLULAR:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Çalışanları

Enfeksiyon Kontrol Ekibi

UYGULAMA:

1. Kuvözlerin içi ve dışı her gün temizlenir, kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılır.
2. Uzun süre izlenen bebeğin kuvözü en az haftada 1 kez, bebek 1 kg nin altında ise 5 günde 1 kez dezenfekte edilir. Bu işlem esnasında bebek başka bir dezenfekte kuvöze transfer edilir
3. Kuvözün önce ayrılabilir bütün parçaları çıkarılır, fırçalanarak yıkanır, deterjanla ovularak temizlenir.
4. Sonra durulanır ve tek kullanımlık kağıt havlularla kurulanır.
5. Kuvöz parçaları klorin (200-500 ppm), %70 lik isopropyl alkol, hidrojen peroksit, kuarterler amonyum bileşikleri ve benzalkonyum klorit ile dezenfekte edilebilir.
6. Hava filtresinin bakımı ve değiştirilmesi üretici firma önerilerine göre yapılır.
7. Yatak yüzeyinde bütünlük bozulursa değiştirilmelidir.
8. Hasarlı şilte etkin dezenfeksiyon ve sterilizasyonu engeller.
9. Kuvözde en yoğun kontamine olan bölgeler kuvöz kapakçıkları ve bu kapakçıkları saran yastıkçıkları ve kollarıdır. Bu kısımlar günlük olarak sabunlu su ile temizlenir, haftada bir dezenfektanlarla dezenfekte edilir.
10. Fan üretici firma talimatlarına göre temizlenir, dezenfekte edilir.
11. Tekrar kullanım öncesi kuvöz havalandırılır.
12. Açık yatak ve bebek kotları da benzer şekilde temizlenip dezenfekte edilir.

İlgili Dokümanlar:

Kuvöz Temizlik Takip Formu