



**1.0 AMAÇ:** ..... Hastanesi bipolar koter cihazının doğru kullanımını sağlamak.

**2.0 KAPSAM:** Ameliyathane.

**3.0 SORUMLULAR:** Cihazı kullanan hekim ve birim sorumlusu.

#### **4.0 UYGULAMA:**

- Cihazın kablosunu 2200 walt topraklı prize takılır.
- Cihazın ayak pedalı kablosunu, cihazın ön yüzündeki sağ alt girişe takınız ve cerrahın sağ ayağının altına yerleştiriniz.
- Cihazın sol tarafındaki açma düğmesine basarak çalıştırınız.
- Micro cerrahi yapılacaksa Micro düğmesine, Macro cerrahi yapılacaksa Macro düğmesine basınız.
- Cihaz ayak pedallı veya otomatik olarak çalışmaktadır. Otomatik kullanılacaksa penset işaretli konuma, ayak pedalıyla çalışacaksa pedal işaretli konuma basılır.
- Bipolar koterin kablosu sağ üst girişe takınız.
- Ameliyat ekibinde olan kablo ucuna bipolar penset takılır. Cihaz kullanıma hazırdır.
- Cerrahın isteğine göre - ve + düğmeleriyle kademe kademe ayar yapılır. Hızlı yükseltilecekse 1-2-3-4 düğmeleri kullanılarak ayarlama yapılır.

#### **İlgili Dokümanlar:**

- Cihaz Kullanım Talimatı