



1.0 AMAÇ: Hastanesi Ameliyathane Biriminde Elektro koter cihazının düzenli kullanımını ve sorumlularını belirlemek.

2.0 KAPSAM: Ameliyathane.

3.0 SORUMLULAR: Cihazı kullanan hekim, hemşire ve birim sorumlusu.

4.0 UYGULAMA:

4.1.Elektro koter cihazının kablolarının yeterli uzunlukta olup olmadığını ve bağlantılarının doğruluğunu kontrol ediniz, cihazın fişini 220w topraklı prize takınız.

4.2.Elektro koter cihazının plağını hastanın ekstremitelerinin (kol yada bacağına) metal ile temas edip edilmediğini kontrol edin, metal ile temas etmemelidir.Emin olduktan sonra koter plağını hastanın uygun olan ekstremitesine dispozbl plak kullanılıyorsa yapıştırın. Rezibl plak kullanılıyor ise plağı ekstremita ile temas edecek şekilde yerleştirin ve hastanın ekstremitesini oynatma, kaldırma riskine karşı sabitleyiniz, bağlayınız.

4.3. Koter plağı uygulanacak bölge kıllı ise kıldan arındırılmalıdır.

4.4. Hastanın altında sıvı birikmesini önleyecek tedbirleri alınız, sıvı birikebilecek ameliyatlarda hasta altı bezi kullanınız.

4.5. Odanın nem oranının % 50 seviyesinde olmasını kontrol ediniz.

4.6. Kullanılan ünipolar koter ise 3'lü girişe, bipolar koter ise koter ucunu 2'li girişe yerleştiriniz.

4.7. Start düğmesine basınız ve cerrahın istediği dereceye göstergesini ayarlayınız.

4.8. Son kontrolleri yaparak cihazı kullanıma hazır hale getiriniz.

Referans Dokümanlar:

Cihaz Kullanım Kılavuzu