



AMAÇ

Kan transfüzyon merkezine gelen test numunelerinin uygun olup olmadığını belirlemek

KAPSAM

Yatan hastaya bakım yapan birimler, Acil servis

SORUMLULAR

İlgili sağlık personeli, Kan Transfüzyon Merkezi çalışanları

UYGULAMA

A-Kabul Kriterleri

1. Pıhtılı olmayan, barkodlu, hemolizsiz, uygun miktarda ve doğru tüpe alınmış kan numuneleri kabul edilir.
2. Formlar eksiksiz doldurulmuş ise kabul edilir.
3. Kızılay' dan gelen kan ürünleri uygun ortamda ve uygun koşullarda gelmiş ise kabul edilir.
4. Gelen kan ürünlerinin üzerindeki etikette yapılmış tüm testlerin sonuçları, kan grubu ve örnek numarası kontrol edilir.
5. Periferik venden aç ya da tok alınan en az 2,5 ml tam kan hemogram tüpüne konur, 1 - 2 defa alt üst edilip gönderilir. Hastaya ait bilgiler istek formu eksiksiz yazılarak numuneyle laboratuvara gönderilir.

B-Red Kriterleri

1. Hemogram tüpüne alınan kan pıhtılı ise red edilir.
2. Kan miktarı az ise numune red edilir.
3. Hemolizli gelen kan numuneleri red edilir.
4. Yanlış tüpte gelen numune red edilir.
5. Üzerinde barkod bulunmayan numune red edilir.
6. Kızılay' dan ambalajı delik olan kan ve kan ürünleri red edilir.
7. Kızılay' dan gelen kan ve kan ürünlerinin mikrobiyoloji testleri çalışıldığını gösteren son kullanım tarihi gösteren barkod yoksa red edilir.
8. Pıhtılı olan eritrosit süspansiyon red edilir.
9. Soğuk zincire uygun taşınılmayan, saklanmayan kan ve kan ürünleri red edilir.