



1.AMAÇ:

Diş ünitesinde kullanılan cerrahi aletlerin temizliğini EKK tarafından belirlenen standartlara göre yapılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM:

Diş Ünitesindeki Ultrasonik Yıkama Cihazının ve Cihazda kullanılan solüsyonun kullanımını kapsar.

3. SORUMLULAR:

Diş ünitesi Sorumlu temizlik görevlileridir.

Yıkama Makinesi Kullanımı Faaliyet Akışı

- Merkezimizde kullanılan cerrahi el aletlerinin en kısa zamanda yıkama ve dezenfeksiyonu sağlanır.
- Cihazın suyu kontrol edilir.
- İçindeki suyun seviyesi cihazın iç tarafındaki çizgiye kadar su doldurulur.
- İçine uygun dezenfektan madde konular.(Oran kullanılan dezenfektan maddeye göre değişebilir)
- Cihazın ön tarafında bulunan **AÇMA/ KAPATMA** düğmesine basılır.
- Kontrol panelinde sıcaklık, güç ve zaman ayarı bulunmaktadır. Güç (titreşim gücü) ayarlanır.
- Cihazın sıcaklığı kullanılan solüsyon özelliğine göre ayarlanır.
- Uygun sıcaklığa ulaşan cihaz içerisine uygun büyüklükteki sepetlerde yıkanacak aletler cihaz tabanına değmeyecek ve suyun üzerine çıkmayacak şekilde bırakılır.
- Yıkama işlemi bittikten sonra aletler durulanır, kurulama işlemi yapıldıktan sonra, paketlenme bölümüne alınır.
- Isı yüksek olduğu için asla çıplak elle dokunulmaz, yıkama sepetinin yıkama tankının tabanına değmemesi sağlanır. Yıkama tankı boşaltıldığında basınçlı su ile yıkanır.
- Solüsyon kirlendikçe ultrasonik yıkama solüsyonu değiştirilir. Yeni solüsyon hazırlanmak üzere boşaltıldığında, tankın içi orta düzey ve/veya yüzey dezenfektanı ile ıslatılmış bezle temizlenir. Ultrasonik yıkama makinelerinin temizliği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılır.

Dental temizleme solüsyonu kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar;

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz
- El yüz vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
- Urunun göz ile teması halinde, hemen bol su ile yıkayıp doktora danışınız.
- Başka yüzeylere temizliğinde kullanılmaz. Kullanırken eldiven giyiniz,
- Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Ambalaj tamamen boşaldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz.
- Zehirlenme durumlarında Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonu arayınız ya da doktora başvurunuz.

TEMİZLEME İŞLEMİNDEN SONRA MUTLAKA DURULAMA, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULMALIDIR.