



Doküman Kodu: YD.FR.001

Yayın Tarihi: -

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 2

YIL/AY		Pazartesi					Salı					Çarşamba					Perşembe					Cuma					Cumartesi					Pazar				
		1.KÜ	2.KÜ	3.KÜ	4.KÜ	5.KÜ	1.KÜ	2.KÜ	3.KÜ	4.KÜ	5.KÜ	1.KÜ	2.KÜ	3.KÜ	4.KÜ	5.KÜ	1.KÜ	2.KÜ	3.KÜ	4.KÜ	5.KÜ	1.KÜ	2.KÜ	3.KÜ	4.KÜ	5.KÜ	1.KÜ	2.KÜ	3.KÜ	4.KÜ	5.KÜ	1.KÜ	2.KÜ	3.KÜ	4.KÜ	5.KÜ
GÜNLÜK BAKIM VE TEMİZLİK (günde 2 kez ve gerektiğinde)	*Kuvözlerin İç ve Dış Temizliği Yapıldı (Günde 2 kez)																																			
	*Kuvöz Kapakçıklarının, Yastıkçıklarının ve Kollarının, Ayrılabilir Parçalarının Temizliği Yapıldı(Günde 2 kez)																																			
	*(Hasta varsa)Kuvöz Su Haznesinin Nemlendirme Kabı Boşaltılıp Temizlendi ve Steril Su Konuldu)Günde 1 defa																																			
	*Yatak Temizlendi,yatak kılıfı ve yatak koruyucu değiştirildi(Günde 2 defa ve gerektikçe)																																			
TABURCULUK SONRASI BAKIM VE TEMİZLİK	*Kuvözün Dış yüzeyi Temizlendi ve Uygun Dezenfektanla Dezenfekte edildi																																			
	*Kuvözün Kapakçıklarının, yastıkçıklarının ve kollarınınTemizliği Yapıldı ve Uygun Dezenfektanla Dezenfekte edildi																																			
	*Kuvözün Ayrılabilir Parçalarının ve Tüm iç Yüzey Temizliği Yapıldı ve Uygun Dezenfektanla Dezenfekte edildi																																			
	*Kuvöz Su Haznesinin Nemlendirme Kabı Boşaltılıp Temizlendi , Dezenfekte edildi.																																			
FİLTRE DEĞİŞİMİ	Üretici Firmanın Önerileri Doğrultusunda ve Gerektiğinde																																			
TEMİZLİĞİ YAPAN																																				
KONTROL EDEN																																				

*Temizlik öncesi bebek başka bir küvöze yada kot yatağa alınmalıdır.Temizliği uygulayacak olan personel korunmak için tek kullanımlık önlük ,eldiven giyer ve maske takar.

*Rutin temizlik ve dezenfeksiyon işlemi sırasında küvözün kapakçıkları, yastıkçıkları ve kolları, ayrılabilir parçalar çıkartılıp fırçalanarak (1 litre suya 10 cc deterjan) deterjanlı su ile uygun bezle (pembe) silinip durulanır,kağıt havlu ile kurulanır.

*Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda sprey dezenfektan sıkılarak 5 dakika beklenmeli ve kağıt havlu ile silinip tbbi atık çöpüne atılmalıdır.Sonrasında temizlik ve dezenfeksiyon sağlanmalıdır.



Doküman Kodu: YD.FR.001

Yayın Tarihi: -

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 2 / 2

*Dezenfeksiyon işlemi sırasında küvözün kapakçıları, yastıkçıları ve kolları, ayrılabilir parçaları çıkarılıp fırçalanarak (1 litre suya 10 cc deterjan) deterjanlı su ile uygun bezlerle silinip durulanır.Küvöz için uygun dezenfektan sprey tüm yüzeylere temas edecek şekilde 20-30cm mesafeden sıkılır etki etmesi için 3-5 dakika beklenir.Sonrasında kağıt havlu ile silinerek kurutulur. Küvöz hemen kullanılacaksa 10 dakika havalandırılmalıdır..Hasta prematüre ise 5günde bir term ise 7 gündünde bir dezenfeksiyon uygulanmalıdır.

**(Hasta varsa) 24 saatte bir Kuvöz Su Haznesinin Nemlendirme Kabı Boşaltılıp Temizlemeli ve Steril Su Konulmalıdır.Hasta prematüre ise 5günde bir term ise 7 gündünde bir dezenfeksiyon uygulanmalıdır.Küvöz kullanılmayacaksa nemlendirici bölümüne su konulmadan kuru bir şekilde dezenfeksiyon sonrası 24 saat ısıtılarak tam olarak kurutulmalıdır.

*Hava filtresi Üretici Firmanın önerileri doğrultusunda sıklıkla ve gerektiğinde değiştirilmelidir.