



EKG CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Cihazı Adı	: ASPEL ASCARD GREEN
Cihazın Markası/Modeli	: CE0-419
Cihazın Seri Numarası	: SN
Cihazın Özellikleri	: 12 DERİVASYONLU EKG
Cihazın Kullanıldığı Birim:	Acil Servis
1	Açmak için “on” tuşuna basınız
2	Görüntüde parazit oluşumunu engellemek için “filter” tuşuna basınız
3	Derivasyonları ayarlamak için 1/3 numarasına basınız
4	Hastanın göğüs ve ektremite derivasyonlarını yerleştiriniz
5	Cihaz üzerinde “start” tuşuyla görüntüleme yapılır.
6	“Ok” tuşuna basarak yazdırma işlemini yapınız
7	İşlem bittikten sonra “of” tuşuna basarak kapatınız
8	
9	
10	